


鸣谢!

感谢选购Tirami-su (提拉米-苏)身姿矫正器。
Tirami-su (提拉米-苏) 是一款可穿戴的坐姿站姿矫正器，其主要是为了纠正儿童在学习过程中的各种不良身姿。
当然成人如果佩戴，也能很好的纠正在工作生活中的不良坐姿站姿，特别是长时间坐在电脑旁，或者腰椎颈椎病患者。

包装里面


1. Tirami-su (提拉米-苏) 身姿矫正器
2. USB充电线
3. 磁性扣
4. 用户指南
5. 质保书

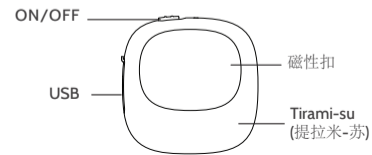

操作指南-三步奏

1 充电

接上USB接口，红色指示灯亮起表示正在充电，充满后蓝灯亮。电池充满大概需要45分钟。
充满一次，正常可使用1月左右。
当矫正器电量较低时，红色指示灯每个10秒闪一次，用于提示用户尽快充电。

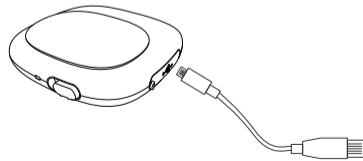


2 佩戴

打开矫正器开关，红灯蓝灯将会闪各自闪一次，并随后马达短震动一次。然后将矫正器置于衣服内测，并用磁性扣在衣服外侧固定住矫正器。我们建议佩戴在锁骨下方位置。



3 校准

保持舒适正确的身姿（抬头挺胸）大概几秒钟左右，直到马达短震动两次即可。
这时校准完成，之后可正常使用即可，矫正器会实时进行身姿检测。
我们建议一天多进行几次校准，特别在位置改变之后。

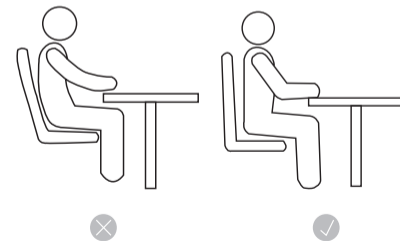

姿势矫正提醒

Tirami-su(提拉米-苏)通过马达震动提醒用户。
当用户姿态倾斜， Tirami-su(提拉米-苏)身姿矫正器将会每个10秒重复震动一次，直到用户身姿恢复正确身姿。
一旦发现Tirami-su(提拉米-苏)一直震动，即使恢复正确姿势。
这种情况我们建议用户重新开机，并重新进行一次校准。

久坐提醒

当马达每次连续三次震动时，这表示用户已经超过45分钟没有活动。
这时用户应该站起来活动一阵子。
否则Tirami-su(提拉米-苏)将会连续提醒5次震动提醒。

如有其他任何问题，请访问我司官网 www.isweo.com